

止血用バンド

パラ・メジャー[®]




目盛りでメモリー

- Point 1 止血圧の再現
- Point 2 患者様に最適な止血圧
- Point 3 操作者ごとの止血圧バラつき低減

EOG
滅菌済

< 付属品 >
圧迫パッド
25×25×5mm

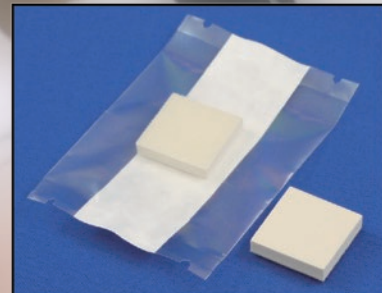

目盛り付き止血用バンドの必要性について

止血は、基本的には用手的に行い血液が浸み出さない最低の圧がよいとされています¹⁾。しかし、止血操作者ごとに適切な止血圧を毎回一定に維持するのは容易ではありません。そこで、患者さんの血管に最適な締め具合を補助具の目盛りで毎回再現できるようにしました²⁾。「毎回同じ目盛りで止血しているが、最近、止血時間が延長してきた…。」このような時も止血目盛りの変化がバスキュラーアクセスの状態を把握するのに役立ちます。


- 1) 2011 年版 慢性血液透析用バスキュラーアクセスの作製および修復に関するガイドライン。透析会誌 44 : 855-937, 2011.
- 2) 山家敏彦 : 抜針・止血. 透析ケア vol.22 no.5 : 60-62, 2016.

神奈川県立工科大学工学部臨床工学科教授 山家敏彦

使用上の注意

- 高圧蒸気滅菌器で滅菌しないでください。
- 漂白剤等を使用すると目盛りの印刷が消える恐れがあります。
- 適切な巻き締め圧力にてご使用ください。

製品詳細

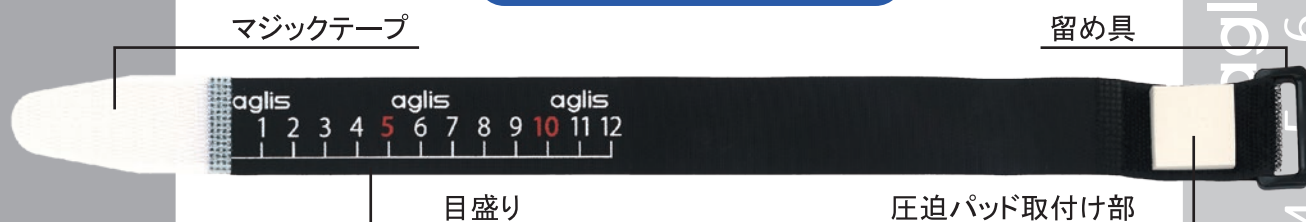

使用方法



付属の圧迫パッドをパラ・メジャーの目盛りのある面に取り付けます。



圧迫したい部分に圧迫パッドを当て、腕にパラ・メジャーを巻き、留め具にマジックテープ部を通します。



目盛りを目安に適切な止血圧で押さえ、マジックテープで固定します。

価格

規格	長さ	対応腕径	定価	販売単位
S	35 cm	約 12 cm ~ 24 cm	¥1,400 / セット	12セット
M	40 cm	約 18 cm ~ 30 cm	¥1,500 / セット	
L	45 cm	約 24 cm ~ 36 cm	¥1,600 / セット	

販売元
株式会社アグリス

〒101-0047
東京都千代田区内神田 1-6-6 MIFビル6階
TEL 03-3233-2077 FAX 03-3233-2079
●HPアドレス <http://www.aglis.co.jp>

