


■ セルスポバイと綿球の消毒液使用量および放液率

セルスポバイに使用されている PVA スポンジは液体を良く吸収し、力を加えると良く放出する性質を持っています。よって、広範囲に塗布が可能で無駄に捨てていた消毒液を有効に使うことができます。


	セルスポバイ ワイドM	セルスポバイ ワイドL	#30 綿球	#40 綿球
吸液量 (mL)	13.3	24.7	14.2	33.7
放液量 (mL)	7.2	16.0	4.0	8.9
放液率	54 %	65 %	28 %	26 %

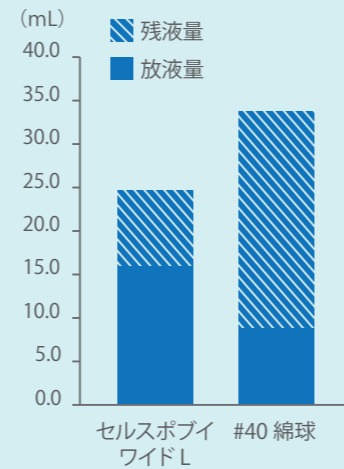

※40mL または 20mL の消毒液 (10% ポビドンヨード液) に浸した後の吸液量、及び 1.5kg のおもりで 1 分間加圧した場合の放液量を測定。放液率は吸液量と放液量から算出。(自社調べ)

■ セルスポバイと綿球の脱落繊維量比較

セルスポバイに使用されている PVA スポンジは脱落繊維がほとんどないため、手術室の清浄度維持、感染リスクの低下に貢献します。

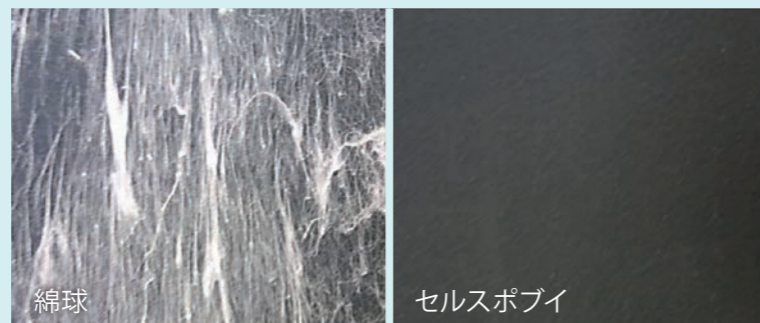

製造販売元
株式会社アグリス

メディカル営業統括管理部
東京都千代田区内神田 1-6-6 MIF ビル 6 階
TEL : 03-3233-2077 FAX : 03-3233-2079

大阪営業所
大阪市中央区石町 1-1-1 天満橋千代田ビル 2 号館 4 階
TEL : 06-4791-2077 FAX : 06-4791-2079
ホームページ www.aglis.co.jp

販売店

お客様相談窓口
TEL : 0943-30-1100

受付時間 10 : 00 ~ 17 : 00 ※土日・祝日を除く

2021.12

aglis

一般医療機器 医療用スポンジ
届出番号 40B2X00022000018

EOG 滅菌済

消毒処置用塗布スティック

Cellspov®

セルスポ®バイ



術野消毒の新しいスタンダードへ

肌に優しいPVA スポンジを使用した新しい消毒液塗布具です!



下腿骨折 骨接合術

椎間板ヘルニア切除術

■使用方法

※別途、消毒液や万能壺・シャーレ等をご準備ください。

1本あるいは2本ずつ包装しEOG滅菌を施しておりますので、開封してからそのままお使いいただけます。
スポンジと柄が一体になっておりますので、スムーズに消毒処置が行えます。



①袋から取り出す

②消毒液に浸す

③患部を消毒

④廃棄

用途に合わせて
使い分けできます



外科・その他診療科向け



Wide ワイドタイプ

腹部・背部・大腿部・腕部 など

整形外科・形成外科向け



Spot スポットタイプ

手指・足指 など

使用本数の目安

スポンジサイズ	頭 #30 綿球 3~4個	腕 #30 綿球 3~4個	腹 #30 綿球 6~8個	背 #30 綿球 5~6個	足 #30 綿球 6~8個
M	2本	2本	4本	3本	4本
L	1本	1本	2本	2本	2本

Wide ワイドタイプ



ワイドM

ワイドL

1本入り包装品



品番	品名	入数	販売単位
CV0001K	セルスポバイ ワイドM	20袋/箱 (20本)	6箱 (120本)
CV0002K	セルスポバイ ワイドL	20袋/箱 (20本)	6箱 (120本)

2本入り包装品



品番	品名	入数	販売単位
CV0005K	セルスポバイ ワイドM (2本入り)	20袋/箱 (40本)	6箱 (240本)
CV0006K	セルスポバイ ワイドL (2本入り)	20袋/箱 (40本)	6箱 (240本)

Spot スポットタイプ



スポットM

スポットL

1本入り包装品



品番	品名	入数	販売単位
CV0010K	セルスポバイ スポットM	20袋/箱 (20本)	6箱 (120本)
CV0013K	セルスポバイ スポットL	20袋/箱 (20本)	6箱 (120本)

2本入り包装品



品番	品名	入数	販売単位
CV0011K	セルスポバイ スポットM (2本入り)	20袋/箱 (40本)	6箱 (240本)
CV0014K	セルスポバイ スポットL (2本入り)	20袋/箱 (40本)	6箱 (240本)

Short ショートタイプ



ショートS

1本入り包装品



品番	品名	入数	販売単位
CV0007K	セルスポバイ ショートS	20袋/箱 (20本)	6箱 (120本)

2本入り包装品



品番	品名	入数	販売単位
CV0008K	セルスポバイ ショートS (2本入り)	20袋/箱 (40本)	6箱 (240本)