

- ** 2023年5月改訂(第7版)
* 2022年8月改訂(第6版)

医療用品(4) 整形用品
一般医療機器 医療用スポンジ 13695000

セルスポイ

再使用禁止


【禁忌・禁止】

再使用禁止
再滅菌禁止


【形状・構造及び原理等】

1. 形状

* 1-1) スポンジ部:片面タイプ

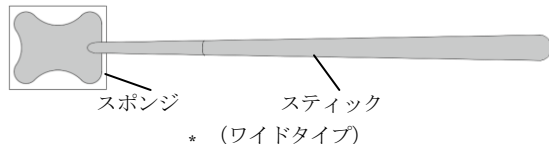


* 1-2) スポンジ部:両面タイプ

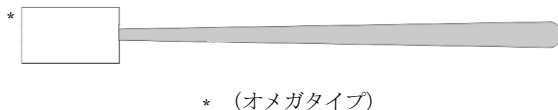


**1-3) 付属品

**・セルスポ容器

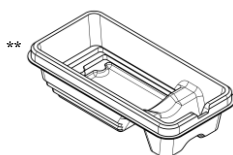

** (1本用)

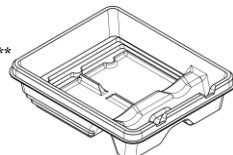

** (2本用)

** 2. 構造

本品は、スティック付きのPVA(ポリビニルアルコール)スポンジである。なお、付属品を組み合わせる場合がある。

* 3. 原材料

スポンジ：ポリビニルアルコールスポンジ
スティック：ポリプロピレン

【使用目的又は効果】

薬液の塗布、又は液の除去に使用する。

【使用方法等】

スティックを手で持ち、スポンジ部分で薬液の塗布、又は薬液の除去を行う。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- ・本品使用中に皮膚障害と思われる症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、適切な治療を行うこと。
- ・本品のスポンジ部分を十分に薬液に浸漬し、スポンジが吸液(復元)したことを確認したのち、使用すること。
- ・スポンジの加工・製造上、スポンジ部分を薬液に浸漬した際に、復元が不均一となることがあるが、製品の有効性及び安全性に影響を及ぼすものではないため使用可能である。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- ・直射日光及び紫外線を避け、湿気の少ない場所で保管すること。
- ・水濡れに注意して保管すること。

2. 有効期間

製造日より3年間(自己認証による)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 株式会社アグリス
福岡県八女市鶴池 477-1
TEL 0943-30-1177